

Tissue Porcelain

پودر پرسلن رنگ لثه شرکت نوریتاکه

Super Porcelain EX-3 Super Porcelain EX-3 PRESS CZR CZR PRESS



شرکت نوریتاکه 7 پودر رنگ لثه دسته بندی شده را برای کار با پرسلنهای EX-3 PRESS LF که درجه پخت پائین تری دارند، برای ساخت روکشهای PFM (پرسلهایی که به فریم فلزی باندینگ و چسبندگی میدهند)، روکشهای CZR که از جنس زیرکونیا میباشند و همچنین روکشهای CZR PRESS LF که درجه پخت پائین تری دارند (برای ساخت روکشهایی که به زیرکونیا باندینگ و چسبندگی میدهند) آماده و مجهز کرده است.

Noritake
Hiro Takatori

Line-up tissue colors

پودر پرسلن رنگ لثه آماده و مجهز شده

بوسیله این پودر پرسلنهای رنگ لثه آماده و مجهز شده میتوان رنگهای لثه واقعی را برای ساخت کرون، بریج ها و ساخت و ترمیم روکش مخصوص ایمپلنتها دوباره ساخت.



Tissue 1
Average
tissue color

رنگ لثه 1
رنگ لثه متوسط



Tissue 2
Light tissue
color

رنگ لثه 2
رنگ لثه روشن



Tissue 3
Dark tissue
color

رنگ لثه 3
رنگ لثه تیره



Tissue 4
Mix with
1, 2 or 3 to
increase value

رنگ لثه 4
میتوانید با رنگ لثه های
1 و 2 و 3 برای افزایش ویلوی
رنگ لثه مخلوط کرد.



Tissue 5
Opacious reddish
color for inside
of tissue

رنگ لثه 5
ایکی که رنگ آن متمایل به قرمزی
است که از آن برای زیرسازی پودر
رنگ لثه استفاده میشود...



Tissue 6
Bright pink
tissue color

رنگ لثه 6
رنگ لثه درخشان و روشن
میباشد.



Tissue 7
Strong reddish
color for the
tissue surface

رنگ لثه 7
رنگ لثه با رنگ قرمز تند برای فرم
دادن سطح لثه و بدست آوردن
رنگ دلخواه.

مثالی برای نشان دادن نحوه پودرگذاری قسمت رنگ لثه

نواحی دندانی : CZR نواحی جنجیوالی : CZR PRESS LF



1 برای افزایش مقاومت و باندینگ و چسبندگی بین فریم زیرکونیا و پرسلن، یک لایه نازک از پرسلن Tissue 4 را به عنوان واش اپک و زیرسازی استفاده کنید.



بعد از پخت



2 از پرسلن Tissue 4 که (ترنسلوستنی کم و ولیوی بالایی) دارد را برای تنظیم ترنسلوستنی در نواحی اساسی فریم زیرکونیا و زیرسازی رنگ لثه بکار ببرید.



3 از پرسلن Tissue 6 برای ایجاد و خلق کردن رنگ لثه روشن و درخشان در نواحی جنجیوالی استفاده کنید



3 از پرسلن Tissue 7 در نواحی ماجین فریم زیرکونیا استفاده کنید تا رنگ تند قرمز را در نواحی جنجیوالی خلق کنید.
*ازمدیفایر استین رنگ پایه زیرکونیا (SS) Modifier CZR و EX-3 و استین داخل پودری برای تنظیم کردن رنگ لثه نواحی جنجیوالی میتوان استفاده کرد.



4 با زحمت فراوان و به سختی میتوان درخشانی، حالت اپکی بودن و میزان قرمزی رنگ لثه را کنترل کرده و رنگ طبیعی لثه را دوباره ایجاد نمود.

شرکت نت تهران نماینده انحصاری شرکت نوریتاکه ژاپن
دفتر مرکزی: ولیعصر، ابتدای مطهری، خیابان منصور، پلاک ۷۳، طبقه اول
تلفن: ۲۰-۸۸۷۰۹۱۱۲ فکس: ۸۸۷۲۰۴۴۰
فروشگاه: خیابان آزادی، تقاطع اسکندری شمالی، پاساژ آزادی، طبقه اول، واحد ۴۲
تلفن: ۲-۶۶۹۱۴۹۸۱ فکس: ۶۶۹۳۹۱۵۹
پست الکترونیکی: info@net-tehran.com وب سایت: www.net-tehran.com